



**VULPES BABY CARE**

# **BORSTMASSEGEAPPARAAT**

**HANDLEIDING**

# INHOUD

1. Product parameters & product structuur	3
2. Product voordelen & hoe te gebruiken?	4
3. Veiligheidsmaatregelen & FAQ	5
4. Service & garantie	6

# PRODUCT PARAMETERS & PRODUCT STRUCTUUR

## Product parameters

Materiaal: Siliconen & ABS

Funcities: Geeft vochtige warmte af

Afmetingen: 115\*60\*26.5MM

Vibratiemodus: Zes trillingen modus


Warmtemodus: 3 level modus (laag/middel/Hoog)

Oplaadmethode: USB-Oplaadbaar

Gebruikerstijd: > 5 uur

Oplaadtijd: <2 uur

## Product structuur

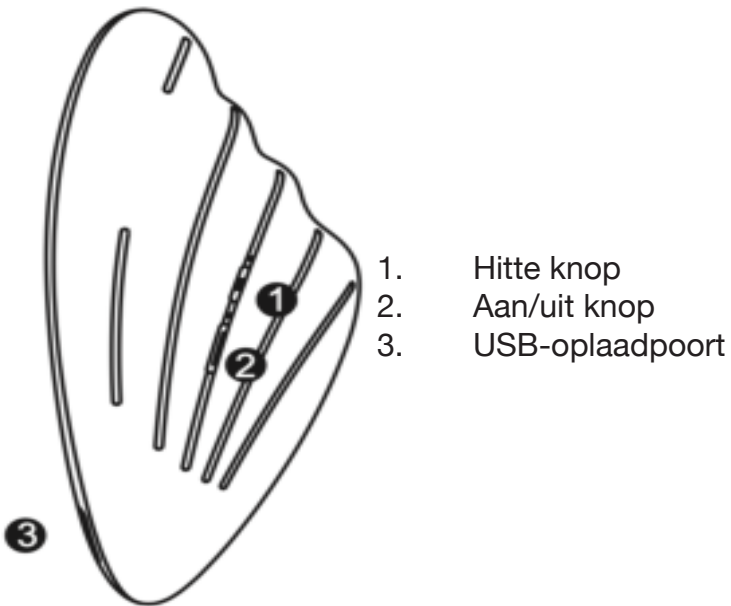

# PRODUCT VOORDELEN & HOE TE GEBRUIKEN

## Product voordelen

### 1. VERBETEREN VAN DE BORST MELKSTROOM TIJDENS DE BORSTVOEDING:

De vibratie van het apparaat kan helpen bij het uitdrukken van moedermelk, het verlichten van de verstopte melkkanalen en het verbeteren van de melkstroom, wat kan helpen bij het oplossen van problemen bij het geven van moedermelk. Het gebruik van het massageapparaat voor het afkolven, kan je helpen om het geven van borstvoeding goed onder de knie te krijgen.

### 2. VERLICHTEN VAN BORST PIJN EN BEDOELT OM DE BORST VRIJ TE GEVEN:

Het gebruik van de borstvoeding massager kan helpen bij het verlichten van borstzwellingen, pijn, tederheid, pijn veroorzaakt door congestie, mastitis, stuwing en andere borstvoeding klachten. De elektrische lactatie van de massager kan effectief voorkomen dat borstvoeding pijnlijke en ongemakkelijke symptomen met zich mee zal brengen.

### 3. KLEINE MASSAGER & SPECIFIEK ONTWERP VOOR DE BORST

Het kleine formaat en de originele borstvorm van de massager zijn zeker gemakkelijk te gebruiken. De borstmassager voor vrouwen kan ook onder de beha worden gebruikt, wat zeer eenvoudig en effectief is.

### 4. OPLAADBAAR ONTWERP:

De oplaadbare borstmassager is effectiever dan de handmatige lactatiemassagers. Vergeleken met het handmatige type, kun je de borst masseren zonder enige inspanning, wat je kan helpen beter borstvoeding te geven. Zelfs wanneer je een melkvanger voor borstvoeding gebruikt, kan deze helpen om de melk zo snel mogelijk uit te drukken en de efficiëntie van de moedermelkopslag te verbeteren.

## Hoe te gebruiken?

1. ON/OFF knop: Lang indrukken gedurende 1,5s om AAN/UIT te schakelen, je moet het apparaat kort indrukken om door de verschillende vibratiestanden te bladeren.
2. Verwarmingsknop: Lang indrukken gedurende 1,5 sec. om AAN/UIT te schakelen, kort indrukken om de verwarmingsmodus van Laag-Midden-Hoog te doorlopen.



## VEILIGHEIDSMATREGELEN & FAQ

1. Opladen voor een volledige sessie. **(Als het apparaat bijna leeg is, knippert het rode lampje. Als het apparaat wordt opgeladen, blijft het rode lampje branden. Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het rode lampje uit.)**
2. Gebruik de USB-kabel die bij het product wordt geleverd, andere kabels kunnen schade veroorzaken aan het product of je stopcontact.
3. Veeg alleen af met een zachte doek.
4. Bewaar en laad op bij kamertemperatuur, gebruik het product niet als het warm is.
5. Bewaar de verpakking en handleiding in een droge en geventileerde ruimte.
6. Bewaar het apparaat niet in warme ruimtes!

### FAQ

1.V: Is dit alleen voor als je kolft? Of kun je het ook gebruiken bij borstvoeding?

A: Je kunt het op elk moment gebruiken om je borsten zachter te maken voordat je gaat kolven of je kunt het onder de warme douche gebruiken om zwellingen te helpen verminderen.

2. V: Kan het apparaat handmassages vervangen voor mijn ongemak bij het afkolven?

A: Ja en beter nog; De massage- en verwarmingsfuncties zijn comfortabeler dan een handmassage.

3. V: Kunnen de massagefunctie en de verwarmingsfunctie afzonderlijk worden gebruikt?

A: Ja, dit kan!

4. V: Wat is de beste tijd om het te gebruiken? Tijdens het afkolven of het voeden?

A: Je kunt dit verwarmende borstmassageapparaat op elk moment gebruiken, voor, tijdens of na het kolven, het werkt uitstekend met een elektrische borstkolf.

## SERVICE & GARANTIE

Bedankt voor je bestelling van het Vulpes BabyCare® Borstmassageapparaat

Hopelijk ervaar je veel gemak van ons product. Wanneer je niet tevreden bent over ons product, kun je het tot 30 dagen na je aankoop, kosteloos aan ons retour sturen! Daarnaast bieden wij de garantie: niet tevreden is geld terug!

Mocht het apparaat niet werken of wanneer je een andere vraag voor ons hebt, neem dan gerust contact met ons op via: +31 85 004 1705 of stuur ons een mailtje naar [vulpesshipment@gmail.com](mailto:vulpesshipment@gmail.com) wij kijken dan graag samen met jou naar een gepaste oplossing of alternatief.